

AEDの使用方法

簡単 3 ステップ!

1 フタを開ける

電源スイッチを手前に引いてフタを開けます
音声ガイドが流れ、パッド装着指示ランプが点滅します。



AEDの使用条件


- 意識がない
- 呼吸をしていない
- 脈がない (医療従事者のみ)

AED(Automated External Defibrillator)とは?
自動体外式除細動器


- 除細動 : 心室細動を電気ショックで取り除くこと
- 心室細動: 心臓の筋肉がバラバラに震え、ポンプとして血液を送り出すことができない状態(心停止)のこと。

2 パッドを貼る

音声ガイドに従って落ち着いて行動してください

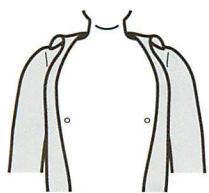

胸部の衣服を脱がす

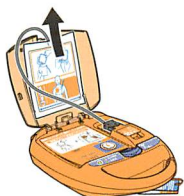


AED本体から電極パッドを取り出す



電極パッドのパッケージを開ける




パッドをケーブル側からゆっくりとねいにはがす

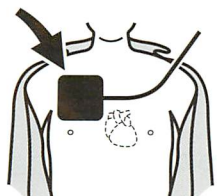


右胸の上部にパッドを貼る



もうひとつのパッドをケーブル側からゆっくりとねいにはがす

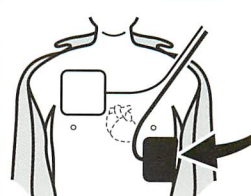

左わき腹にパッドを貼る

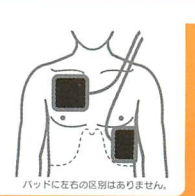


パッド装着指示ランプが消灯していることを確認する

パッドを貼ると、心電図の解析が始まりますので、体にさわらずに次の音声ガイドを待ちます

3 ショックボタンを押す

電気ショックが必要な心電図と判断すると、エネルギーの充電後ショックボタンが点滅します

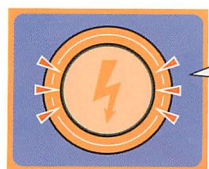

体から離れてください。
点滅ボタンをしっかりと押してください。



周囲の安全を確認し、
ショックボタンを押します。
(アナウンス後30秒以内)

電気ショックを与えた後、または電気ショックは必要ないと装置が判断した場合は、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を繰り返し行います(次の心電図解析までの2分間)